

## ANLEITUNG ZUR ENTNAHME EINER KOPFHAARPROBE

1. Füllen Sie als Erstes das **Untersuchungsformular**, welches Sie von uns erhalten haben, komplett aus. Alternativ kann dieses auch auf unserer Website heruntergeladen werden.

Machen Sie dabei möglichst viele und genaue Angaben. Dies erleichtert die Bearbeitung im Labor merklich.



2. Zwei bleistiftdicke oder mehrere strohhalmdicke Haarsträhnen bevorzugt am Hinterhauptshöcker zusammenwirbeln und jede mit einem Bindfaden fixieren. Dann diese Haarsträhnen kopfhautnah abschneiden. Die am Kopf verbliebene Resthaarlänge in Millimetern im Untersuchungsauftrag notieren.



3. Die entnommenen Haarsträhnen mit der kopfhautnahen Seite auf die gelochte Seite der Aluminiumfolie des Entnahmesets legen.

Die Aluminiumfolie - wie auf dem Bild gezeigt - bitte nur 1x in der Mitte falten.



4. Die so gefaltete Aluminiumfolie bitte noch 1x von der unteren Seite, sowie von rechts und links einschlagen. Die Aluminiumfolie mit dem Barcodekleber des Untersuchungsauftrages kennzeichnen.



5. Das vollständig ausgefüllte Untersuchungsformular zusammen mit der in Aluminiumfolie eingeschlagenen Haarprobe in die mitgelieferte Versandtasche geben.

Die Versandtasche mittels Rückantwortcouvert an uns retournieren.

